



FICHE TECHNIQUE

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2 NR INDIVIDUEL À USAGE UNIQUE NON STÉRILE

FORME ERGONOMIQUE

BANDEAU D'OREILLE ÉLASTIQUE CONFORTABLE LONGUEUR 20 CM

PINCE-NEZ RÉGLABLE



Taux de filtration: \geq à 95%

Masque (dit également demi-masque) filtrant les particules, modèle BKG-N01, de la classe de protection respiratoire FFP2.

.....
EN 149:2001 + A1:2009

.....
Conforme au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

.....
5 couches de filtration efficace

.....
Certificat CE disponible sur demande

.....
Fabrication:
BARI KBK GROUP LTD - Fabriqué en UE - BULGARIE

UTILISATION PRÉVUE

Ce produit est conforme aux exigences de la norme **EN 149:2001 + A1: 2009** pour la protection contre les particules et répond aux exigences de la classe de protection FFP2 qui s'y trouve. Il offre ainsi une protection efficace contre les particules solides et liquides non volatiles (poussière, fumée, brouillard aérosol).

La protection respiratoire n'est efficace que si le masque de protection est correctement sélectionné, ajusté et porté pendant tout le séjour dans la zone de danger.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

- Vérifiez auprès d'une personne compétente si ce produit offre une protection suffisante pour votre application.
- Vérifiez l'emballage individuel des masques et des masques eux-mêmes pour les dommages et salissures possibles.
- Vérifiez que le temps de stockage n'a pas été dépassé.

DESCRIPTION

Masque filtrant pour la protection contre les particules de type FFP2 NR, modèle BKG-N01 avec bande élastique, pour « un usage unique », avec une barre de nez pour une meilleure adhérence et isolation autour du nez. Confortable à porter et ne gêne pas la respiration.

Le masque filtrant pour protéger contre les particules de type FFP2 NR, modèle BKG-N01 est constitué de 5 couches qui sont : 1. 50g Tissu non tissé spunbond ; 2. 25g Tissu meltblown ; 3. 50g Coton ; 4. 25g Tissu meltblown ; 5. 30g Tissu non tissé spunbond.

FIGURE 1



1 Diriger le masque avec l'ouverture vers vous et la pince nasale vers le haut. Tenir le masque par la sangle avec les deux mains.



2 Couvrez complètement votre menton avec le masque. Assurez-vous que la pince nasale est pressée contre l'arête nasale.



3 Tirez les boucles sur vos oreilles.



4 Ajustez la pince nasale à la forme de notre nez et de votre visage en appuyant et en vous penchant avec les deux mains.

COMMENT UTILISER LE MASQUE

- Le masque ne doit être retiré de son emballage individuel que pour une utilisation immédiate.
- Il ne peut pas être utilisé sur des cicatrices profondes ou s'il y a beaucoup de cheveux autour du bord du masque.
- Le masque doit être porté correctement en toute présence dans la zone de danger et remplacé si nécessaire.
- Si le mode d'emploi n'est pas suivi, la santé de l'utilisateur peut être affectée et des dommages à long terme peuvent survenir.
- Ce produit marqué « NR » n'est pas réutilisable, et a une durée d'utilisation maximale d'environ huit heures et ne doit pas être réutilisé après la fin d'un quart de travail.
- Le masque ne doit jamais être modifié ni réparé.

LIMITE D'UTILISATION

Le masque ne convient pas pour la protection contre les radiations, les gaz et les vapeurs nocifs. Il ne peut pas être utilisé dans des environnements anoxiques, sous l'eau, pour la lutte contre les incendies, etc. Le produit ne peut pas être nettoyé et réutilisé.

Si l'air est très pollué, si vous ressentez des étourdissements ou une oppression dans la poitrine, ou si vous avez des difficultés à respirer, veuillez quitter immédiatement la zone d'utilisation et retirer le masque.

STOCKAGE ET DISPOSITION

Les instructions de stockage suivantes s'appliquent au produit emballé :
Température ambiante: -20°C à +40°C
Humidité relative: jusqu'à un maximum de 80% / Tenir à l'écart de la saleté, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

Les masques usagés doivent être éliminés en tant que déchets à risques, si possible conformément aux réglementations locales.



APPROBATIONS, CERTIFICATS

Ce produit répond aux exigences du règlement européen 2016/425 sur les EPI et porte donc le marquage CE.

Certificat CE émis par:
UNIVERSAL CERTIFICATION
and SURVEILLANCE SERVICES

Numéro d'identification de l'organisme notifié : 2163


Il s'agit d'un équipement de protection individuel et non d'un dispositif médical

20 masques par boîte
24 boîtes par carton
40 cartons par palette

FIGURE 2



A Voir les informations du fabricant sur l'emballage

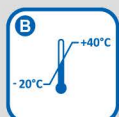

B Plage de température des conditions de stockage



C Humidité relative maximale des conditions de stockage



D Fin de la période de stockage (date d'expiration), format de date: année / mois