

Flacon de Solution Saline Lave-oeil pour Douche Oculaire - PLUM

Référence : G3180004



DESCRIPTION :

Solution au **Chlorure de Sodium NaCl à 0,9%**. Produit de la **gamme PLUM**.

Cette **solution stérile** permet de **nettoyer l'oeil** lors de **projections d'impuretés** tels que la poussière, les copeaux de bois ou encore la limaille de fer.

Elle permet de **réduire les dommages au tissu oculaire** et sa **présence est indispensable** dans le milieu industriel ou lorsqu'il y a manipulation de produits chimiques.



1	2	3	4
1. Identification de l'agent	2. Rincage immédiat	3. Consultation médicale	4. Prise en charge
1.1. Lire l'étiquette	2.1. Rincer avec la solution saline	3.1. Appeler le médecin	4.1. Suivre les instructions
1.2. Identifier le produit	2.2. Rincer pendant au moins 15 minutes	3.2. Se rendre à l'hôpital	4.2. Prendre soin de l'œil
1.3. Informer les collègues	2.3. Continuer le rinçage jusqu'à l'arrivée au service des urgences	3.3. Rester calme	4.3. Éviter de frotter l'œil



INFORMATION PRODUIT

Flacon de Solution Saline Lave-œil pour Douche Oculaire

Ces flacons permettent d'effectuer un **premier soin oculaire** lorsque la victime reçoit des **projections d'impuretés** dans les yeux telles que la poussière, les copeaux de bois ou la limaille de fer, ainsi que les solvants et les huiles.

Chaque flacon contient une **solution ophtalmique stérile à base de Chlorure de Sodium NaCl à 0,9%**. Il s'agit d'une solution saline identique au milieu naturel de l'œil qui permet un rinçage en douceur. Son **usage est unique** pour éviter le risque d'infection et il possède un **capuchon anti-poussière**. Pour l'utiliser, il suffit de tourner l'œil et de l'appliquer sur l'œil infecté. **Ergonomique et souple**, elle permet de maintenir l'œil ouvert et assure un flux de liquide fin et régulier pour un **rinçage optimal**.

Les flacons de **200 mL** permettent un **rinçage de 2min** et les flacons de **500 mL** un **rinçage de 5 min**. En cas d'incident, le CHSCT recommande un **rinçage d'une durée minimale de 15 min**, jusqu'à évacuation des corps étrangers de l'œil et jusqu'à l'arrivée chez un médecin ou aux urgences en cas de projection d'huiles et de solvants.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Vous retrouverez nos flacons **disponibles en contenance de 200 ou de 500 mL** pour rincer et soigner l'œil infecté. Dans les zones à risque, gardez toujours un flacon à portée de main pour votre protection. Nos flacons peuvent être utilisés avec notre [station murale](#), notre [trousse de transport](#) ainsi que les [stations QUICKSAFE](#).

Caractéristiques

- **Prêt à l'emploi**
- **Compact**
- **Type de solution** : Saline
- **Composé** : Chlorure de Sodium à 0,9%
- **Pour les projections d'impuretés, de poussières, de copeaux ou de limaille de fer.**
- **Temps de rinçage** :
 - **Flacon 200 mL** : 2 min
 - **Flacon 500 mL** : 5 min
- **Contenance** :
 - 200 mL
 - 500 mL
- **Si Capuchon** : enlevez-le, et retourner le flacon la tête en bas pour une meilleure vérification de la qualité du produit
- Produit de la **marque PLUM**.

Vidéo de Démonstration

Pour les personnes amenées à transporter des flacons de lave-œil pour un usage personnel, ce changement améliorera grandement la praticité et la portabilité. Les flacons peuvent être stockés en toute sécurité dans une sacoche-ceinture ou dans un kit de premiers soins, permettant ainsi un accès rapide en cas de besoin.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3180004 Contenance (en L) - 0,2

Réf. G3180019 Contenance (en L) - 0,5



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com