

Flacon de Solution Neutre Lave-Yeux DUO pour Douche Oculaire - PLUM

Référence : G3180007



DESCRIPTION :

Pour un **lavage simultané des yeux**.
 Solution pH Neutre avec un tampon de phosphate à 4,9%. Produit de la **gamme PLUM**.

Cette **solution stérile** permet de **nettoyer l'œil** lors de **projections d'acides et d'alcalins dans les yeux**.

Elle permet de **réduire les dommages au tissu oculaire** et sa **présence est indispensable** dans le milieu industriel ou lorsqu'il y a manipulation de produits chimiques.



INFORMATION PRODUIT

Flacon de Solution Neutre Lave-Yeux DUO pour Douche Oculaire

Ces flacons permettent d'effectuer un **premier soin oculaire** lorsque la victime reçoit des **projections d'acides et d'alcalins** dans les yeux.

Chaque flacon contient une **solution ophtalmique stérile avec un tampon de phosphate à 4,9%** et de **sels de phosphates**, naturellement présents dans le corps humain. Il s'agit d'une solution capable de **neutraliser les substances acides**, grâce au tampon de phosphate d'hydrogène, **et alcalines**, grâce au phosphate de dihydrogène. La solution permet alors de **neutraliser le produit chimique à un niveau de pH de 7,4** environ, correspondant au niveau de pH normal du liquide lacrymal.

A **usage unique** pour éviter le risque d'infection, le flacon possède un **capuchon anti-poussière**. Il **dispose d'une 1/2 illère DUO ergonomique** qui permet de rincer les deux yeux en même temps. Plus besoin de choisir quel 1/2il sauver en premier. Elle permet aussi de maintenir l'1/2il ouvert et assure un flux de liquide fin et régulier pour un **temps de rinçage**



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
 Zone Ravennes les Francs
 59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
 Du lundi au vendredi
 de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
 24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
 mail : contact@securinorme.com

optimal.

Les flacons de **500 mL** permettent un **rinçage de 5min**. En cas d'incident, le CHSCT recommande un **rinçage d'une durée de 2 min avant de poursuivre le rinçage avec la [solution lave-œil au chlorure de sodium](#)** et ce jusqu'à l'arrivée chez un médecin ou aux urgences.

Vous retrouverez nos flacons **disponibles en contenance de 500 mL** pour rincer et soigner les yeux infectés. Dans les zones à risque, gardez toujours un flacon à porter de main pour votre protection. Nos flacons peuvent être utiliser avec notre **[coffret de rinçage des yeux](#)**. **Il est capital d'avoir toujours ces flacons de solution à porter de main en quantité suffisante.**

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Compact
- Type de solution : Neutre
- Composé : Tampon de phosphate à 4,9%
- Pour les projections d'impuretés, de poussières, de copeaux ou de limaille de fer.
- Temps de rinçage : 5 min
- Contenance : 500 mL
- Capuchon anti-poussière intégré
- Produit de la **marque PLUM**.

Vidéo de Démonstration



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com