

## 100 Sacs D'insufflation Sani Baby

Référence : G3580054



### DESCRIPTION :

Ce système hygiénique garantit une ventilation et une expiration réalistes par la bouche et le nez.

### INFORMATION PRODUIT

Lot de 100 sacs d'insufflation pour mannequin Sani Baby. Système hygiénique pour prévenir tout risque de contamination croisée lors de l'utilisation d'un mannequin de formation Sani Baby.

Ce système hygiénique garantit une ventilation et une expiration réalistes par la bouche et le nez.

Pour vérifier que ce système est correctement mis en place, les utilisateurs doivent s'assurer qu'à chaque session à laquelle ils participent, on leur distribue une peau de visage personnelle et qu'ils mettent en place un sac d'insufflation quand vient leur tour de pratiquer la ventilation sur le mannequin.

#### Insufflation

Lorsqu'on insuffle de l'air par la bouche ou par le nez de la peau de visage, le sac d'insufflation jetable se remplit. L'air ambiant et non la respiration du stagiaire passe dans le mannequin et provoque la dilatation des poumons / de l'estomac.

#### Expiration

A la fin de l'insufflation, l'air ambiant retourne vers la tête et comprime le sac d'insufflation. Lors de ce processus, l'air insufflé par le stagiaire est expiré par la bouche et le nez du mannequin.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com