

Masque inclusif fenêtre bord à bord réglable - Blanc - homologué UNS1 et UNS2

Référence : G4480086

DESCRIPTION :

Masque inclusif fenêtre bord à bord - Blanc - homologué UNS1 et UNS2

Ce masque à fenêtre ou masque sourire est un masque barrière possédant une fenêtre antiprojection transparente permettant ainsi de rendre visible les expressions du visage.

Ce masque répond aux prescriptions des autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



INFORMATION PRODUIT

Masque inclusif fenêtre bord à bord - Blanc - homologué UNS1 et UNS2

Ce masque à fenêtre ou masque sourire est un **masque barrière** possédant une fenêtre antiprojection transparente permettant ainsi de rendre visible les expressions du visage.

Il permet aussi la **lecture labiale** (lèvres apparentes) pour les personnes sourdes ou malentendantes, tout en les protégeant contra la propagation du virus.

Ce masque inclusif est idéal pour toutes les activités professionnelles en **contact avec du public** comme la restauration, les écoles, collèges & lycées, les commerces ou encore les administrations.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Le masque inclusif transparent est-il efficace dans la lutte contre la COVID 19 ?

Le **masque transparent** remplit toutes les conditions nécessaires afin de se protéger de la COVID-19, il est aussi efficace qu'un masque lavable ou à usage unique. Il faut le laver régulièrement et éviter de le toucher.

Ce masque répond aux prescriptions des autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Recommandations et utilisation

Le temps de port du masque inclusif est limité à 4h.

Il faut changer le masque :

- quand vous souhaitez boire ou manger,
- quand il devient difficile de respirer,
- si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries,
- si le masque est endommagé,
- si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage

Entretien du masque

Avant la 1ère utilisation le masque doit être lavé. Après utilisation, le masque doit être **isolé** soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver.

Comment laver votre masque inclusif ?

Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu à une **température de 60°C**, avec un cycle de 30 minutes minimum. Chlore interdit (consigne **COVID-19**). Repassage à très basse température autorisé sans vapeur. Pressing autorisé.

Spécifications :

- Efficacité de protection aux aérosols (particules 3 µm) = 96%, catégorie UNS1
- Emballage individuel
- Barrette nasale et système anti-buée intégrés
- Fabriqué en France
- Coloris Blanc
- Ce masque n'est pas jetable, mais réutilisable
- Testé 50 lavages
- Homologué UNS1 et UNS2



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com